

Gebruiksaanwijzing FAST Botgroeistimulator (BGS)

Vorbereiding

Het te behandelen lichaamsdeel moet haarvrij zijn.

Steek het tweedelige stroomsnoer (C) in de achterzijde van de generator (A) en plaats de stekker in het stopcontact (220 V). Op de bovenzijde van de generator brandt continue een groen lampje.

Steek de behandelingskop (B) stekker in de zwarte holte (voorzijde generator). De witte stippen moeten in één lijn met elkaar zijn. Draai daarna de zwarte ring van de stekker (met de klok mee) tot u een "klik" hoort/voelt.

Bevestig het blauwe klittenband met de grijze koppeling (D) secuur op het te behandelen lichaamsdeel. Het klittenband niet te strak vastmaken.

Met de grote doorsnede van de gelpad (E) bovenop plaats de gelpad in de hele plastic ring (F). Maak de bovenkant van de gelpad nat met water (twee keer spuiten met de waterfles (H)). Zet deze kant van de gelpad op de zwarte oppervlakte. Door uw vingers op het midden van de gelpad te drukken worden de luchtballen tussen de gelpad en de zwarte oppervlakte verwijderd. Maak de gelpad vast door de gele plastic ring op de behandelingskop te drukken.

Spuut twee keer op de huid in de behandelzone (binnen de cirkel van de grijze koppeling (D)). Plaats de behandelingskop in de grijze koppeling, zodat de gelpad volledig met de huid in contact komt. Terwijl u de behandelingskop goed tegen de huid indrukt, maak de behandelingskop vast in de koppeling door het gele schuifknopje te sluiten.

Inschakelen / Uitschakelen

Druk de linker knop "I" in. U hoort een pieptoon en op de display ziet u "20 min". U bent nu onder behandeling. De klok telt terug naar "0 min" wanneer een sessie afgelopen is (gaat automatisch uit).

Druk de linker knop "I" uit wanneer u een sessie tijdelijk wilt onderbreken.

Behandelingsperiode

Eén sessie van 20 minuten per dag, elke dag. Er moet minimaal 12 uur tijd tussen twee sessies zitten.

Probeer van dag tot dag hetzelfde behandelingsschema aan te houden.

Hoewel FAST BGS behandelingen een genezingspercentage van 82 % hebben, zijn de behandelingen niet voor iedereen even succesvol (18 %).

Genezing treedt op na 13-14 weken en een eerste klinische controle moet na 6-7 weken plaatsvinden (met uw behandelende chirurg).

Schoonmaken

Ontkoppel de stroomvoorziening van de generator. Gebruik een vochtig doekje met zeep om de generator en behandelingskop schoon te maken en vervolgens goed af te drogen. De generator mag niet met vloeistof in aanraking komen.

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.