

Gebruiksaanwijzing Osteobit Botgroeistimulator (BGS)

Vorbereiding

Het te behandelen lichaamsdeel moet haarvrij zijn.

Steek (B) elektrodes in (D) kabel. Steek (D) kabel in (A) generator zijkant. Plak (B) elektrodes op het lichaam zoals door de vertegenwoordiger uitgelegd. Elektrodes moeten op de huid geplakt zijn en niet in contact met elkaar komen. Zet generator op uw broekriem.

Inschakelen

Zet aan (I) / uit (O) knop op I. U hoort een korte piep en de gele stimulatie- en rode acculampen branden eventjes. Daarna gaat de gele lamp knipperen. U bent onder behandeling!

Uitschakelen

Zet aan (I) / uit (O) knop op 0.

Accu Opladen

Vervang (D) kabel met (C) accu oplader. Steek C in stopcontact. Opladen duurt 5 uur of tot rode acculamp continu brandt. Opgeladen accu werkt 20 uur. Wanneer accu moet worden opgeladen knippert de rode acculamp. Wanneer rode acculamp begint met knipperen werkt stimulatie nog 4 uren (minimaal).

Vervanging Elektrodes

Vervang elektrodes wanneer ze niet of niet goed meer op de huid plakken (ongeveer na 3-4 dagen). Plak elektrodes nooit op natte huid. Elektrodes niet afknippen of kleiner maken. Plaats elektrodes nooit op open of geïrriteerde huid. Bewaar elektrode transparantfilm voor elektrodes op te plakken wanneer ze niet in gebruik zijn.

Behandelperiode

Behandeling is 10 uur per dag. Normaliter vindt behandeling plaats overdag. Probeer hetzelfde behandelingsschema aan te houden van dag tot dag. Hoewel Osteobit BGS behandeling een 82 % genezingspercentage heeft, is de behandeling niet voor iedereen succesvol (18 %). Een behandelingsperiode duurt 14 weken en een eerste klinische controle bij 7 weken met uw behandelend chirurg is geadviseerd.

Schoonmaken

Zet de generator uit (O)! Nooit schoonmaken terwijl generator accu wordt opgeladen. Gebruik een vochtig doekje met zeep om schoon te maken en goed afdrogen. Onderdelen en generator mogen niet met vloeistof in aanraking komen. Als generator onder water komt dan is verder gebruikt verboden.

Let op!

Gebruik BGS nooit met natte handen en/of lichaamsdelen.

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.