

Gebruiksaanwijzing Unix Botgroeistimulator (BGS)

Vorbereiding

Steek spoel connector in zwarte holte (voorzijde generator). Draai de connector langzaam (met de klok mee) in de holte. Draai daarna de zwarte ring van de connector (ook met de klok mee) tot u een "klik" hoort.

Steek stroomsnoer in achterzijde van generator en plaats de stekker in het stopcontact (240 V).

Plaats de spoelen over de fractuurlocatie in een tegenovergestelde positie. Bevestig deze met klittenband.

Inschakelen

Druk de linker knop "mains switch" in. **Twee groene lampjes gaan branden.**

Uitschakelen

Druk de linker knop "mains switch" uit.

Behandelingsperiode

Behandeling heeft 8 uur per 24 uur nodig. Normaliter vindt behandeling plaats als patiënt slaapt ('s nachts). Maar kan ook plaatsvinden overdag.

Probeer hetzelfde behandelingsschema aan te houden van dag tot dag.

Hoewel Unix BGS behandeling een 82 % genezingspercentage heeft, is de behandeling niet voor iedereen succesvol (18 %).

Genezing treedt op na 14 weken en een eerste klinische controle bij 7 weken (met uw behandelend chirurg) is geadviseerd.

Schoonmaken

Ontkoppel de stroomvoorziening van de generator. Gebruik een vochtig doekje met zeep om de spoelen schoon te maken en dan goed afdrogen. Onderdelen en generator mogen niet met vloeistof in aanraking komen.

Let op!

Gebruik BGS nooit met natte handen en/of lichaamsdelen. Gebruik BGS apparatuur niet als dit nat is of in bijzijn van credit- en bankpasjes, computerdiskettes, of andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.

12-2010