

Gebruiksaanwijzing: Extra tips voor het ADS Systeem

Extra materiaalbenodigdheden:

- Knabbeltang en/of zaag
- Hamer
- Stevige tang

Bewaar de implantaten in het koelvak (+/- 5° C) voor minimaal één uur en totdat ze geïmplant worden.

Extra Tips:

De begeleidende principes:

1. Verricht een minimale resectie van het kraakbeen (via zaag of knabbeltang). Er moet nog subchondraalbot overblijven dat houvast en steun geeft voor het implantaat.
2. Om meer ruimte te winnen, zodat het inbrengen van het implantaat makkelijker wordt, wordt een beperkte release van de volaireplaat wekeden van de distale midfalanx en proximale distaalfalanx verricht.
3. Om de boorrichting beter te bepalen, gebruik het tweede boortje in de ADS Systeem instrumentenset. Door deze boor eerst naast of op de midfalanx, en daarna distaalfalanx, parallel met de richting van de as van midfalanx, en daarna met distaalfalanx, kan de boorrichting van de boorgaten met veel meer accuratesse plaatsvinden.
4. Gebruik de beitel "chisel" in de instrumentenset om het bot tussen de boorgaten in de midfalanx compact te maken en ruimte te maken voor de dwarsbalk van het H-vormige implantaat. Gebruik de beitel in de distaalfalanx niet!
5. Om een implantaat snel de midfalanx in te kunnen brengen kan het implantaat met een stevige tang in de boorgaten geduwd worden. Het is zeer belangrijk dat de dwarsbalk van het H-vormige implantaat volledig in de midfalanx verzonken wordt. Lukt dit niet soepel met de tang, dan kan met een hamer het implantaat (licht) ingetikt worden.
6. Als de dwarsbalk na bovengenoemde pogingen niet volledig verzonken kan worden, of lukt het niet om de distaalfalanx over de poten van de implantaat te hevelen, verwijder de implantaat dan en boor de boorgaten schoon en/of dieper. Met gebruik van de geleverde steriele koelspray moet het implantaat, voor inbreng, weer afgekoeld worden. Voordat de koelspray wordt gebruikt de spuittip met jodium desinfecteren en de spuitbuis goed schudden.
7. Steun het DIP gewricht voor 3 weken met gips, spalk of splint postoperatief.

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.