

### **Gebruiksaanwijzing: Extra aanwijzingen voor het Metafix I Systeem**

#### **Extra materiaalbenodigdheden:**

- Boorapparaat

#### **Extra Tips:**

1. Om de plek van de osteotomie te kiezen: selecteer een plaat en leg deze op de metatarsus I. Met de diathermie, de metatarsus tussen de twee strepen op de plaat markeren.
2. De doorgezaagde distale *metatarsus* I kan tijdelijk gestabiliseerd worden, door een K-draad dwars door de *metatarsus* I en in de *metatarsus* II te boren.
3. Voor gesloten-wig osteotomieën is het aanbevolen om de plaat altijd te (over)buigen. Met de bijgeleverde buigtangen kunt u de plaat makkelijk bewerken.
4. Om de plaat tijdelijk vast te pinnen aan de *metatarsus* I: boor twee K-draden door de K-draadgaten in de plaat.

#### Schroef 1:

5. Schroef de **2,0 mm diameter boorbuis** aan de plaat in een van de **proximale** schroefgaten. Boor een schroeftunnel met de 2,0 mm diameter boor (in de instrumentenset). Verwijder de boorbuis. Om de juiste schroeflengte te bepalen: meet de lengte van de boortunnel (tot op het bot, niet op de plaat). U kunt ook de dieptemeter inschroeven in de schroefgaten van de plaat om de juiste schroeflengte te bepalen. Zet de zelftappende schroef in de plaat/boortunnel.

#### Schroef 2:

6. Voor de **distale** boorgaten: schroef de **2,5 mm diameter boorbuis eerst op het meer proximale distale boorgat** van de plaat. Boor een schroeftunnel met de 2,5 mm diameter boor. Verwijder de boorbuis. Om de juiste schroeflengte te bepalen: meet de lengte van de boortunnel (tot op het bot, niet op de plaat). U kunt ook de dieptemeter inschroeven in de schroefgaten van de plaat om de juiste schroeflengte te bepalen. Zet de zelftappende schroef in de plaat/boortunnel.

#### Schroef 3:

7. Herhaal stap 6 voor het niet-bezette (meer distale) distale boorgat (2,5 mm dia. boorbuis).

#### Schroef 4:

8. Herhaal stap 5 voor het niet-bezette proximale boorgat (2,0 mm dia. boorbuis).

**Belangrijk: boor nooit een tweede of nieuwe boortunnel zonder eerst een schroef in de eerste of vorige boortunnel volledig in te zetten, anders verliest deze plaat zijn hoekstabiele eigenschap. Eerst boortunnel één maken en dan een schroef erin, dan boortunnel twee en dan een schroef erin, enzovoorts...**

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.