

ActivaPin PIP/DIP artrodesen chirurgische techniek

1,5 mm diameter ActivaPin:

Proximaal

Centraal en 1-2 mm. dorsaal: met een 1,5 mm. diameter K-draad boor ongeveer 2 cm. diep.

Distaal

Centraal en 1-2 mm. dorsaal: met een 1,5 mm. diameter K-draad boor ongeveer 1 cm. diep.

Bij harde botweefsel kunt u de boorgat overboren/reamen met een 1,5 mm diameter boor.

2,0 mm diameter ActivaPin:

Proximaal

Centraal en 1-2 mm. dorsaal: met een 2,0 mm. diameter K-draad boor ongeveer 2 cm. diep.

Distaal

Centraal en 1-2 mm. dorsaal: met een 2,0 mm. diameter K-draad boor ongeveer 1 cm. diep.

Bij harde botweefsel kunt u de boorgat overboren/reamen met een 2,0 mm diameter boor.

Inbrengen van de ActivaPin

Proximaal:

Tik met een hamer de ActivaPin tot een diepte van 1,5-2,0 cm in het boorgat.

Buig de ActivaPin naar de gewenste hoek.

Op het punt waar de ActivaPin ongeveer 1 cm uitsteekt: knip met een schaar de ActivaPin schuin door (zodat er een scherpe speerpunt ontstaat).

Distaal:

Deze falanx wordt op de uitstekende ActivaPin gedrukt totdat proximale en distale falanxen contact met elkaar maken.

Geopereerde gewricht gedurende 3 weken in een spalk zetten.

Vorenstaande beschrijving die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.